

迅速パパニコロウ染色用

ヘマトキシリン Q ・ EA-50Q ・ OG-6Q

この度、弊社では迅速パパニコロウ染色を目的とした各種染色液を開発いたしました。短時間で従来のパパニコロウ染色と同程度の染色態度が得られます。術中迅速細胞診、迅速細胞診（rapid on-site cytologic evaluation; ROSE）への応用が可能です。


■使用方法例

推奨方法

1	塗抹標本作製	
2	固定（エタノール 95）	10 秒
3	固定（ラピッド・フィックス）	10 秒
4	水洗	10 秒
5	核染色（ヘマトキシリン Q）	10 秒前後
6	水洗	10 秒
7	細胞質染色（OG-6Q）	5 秒
8	分別（エタノール 95）	10 秒
9	細胞質染色（EA-50Q）	30 秒
10	脱水、透徹、封入	

■染色例

染色方法：左記推奨方法 検体：胸水（肺腺癌）

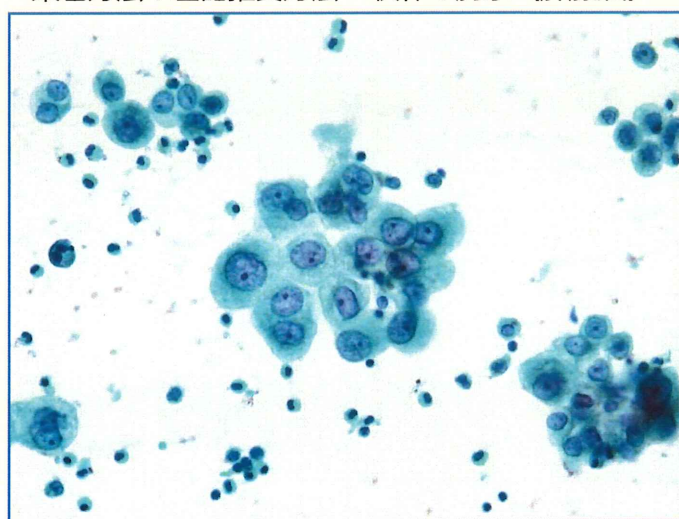

■特長

- ・標本作製（固定から封入）は概ね 2 分で完了します。
- ・固定は 95%エタノールとラピッド・フィックスの併用により 20 秒で完了します。
- ・分別および色出しが不要であり、水洗場所がなくても作業できます。
- ・従来のパパニコロウ染色と遜色のない染色結果が得られます。

■価格表

品名	品番	容量	価格（税別）
ヘマトキシリン Q	22231	200 ml	1,760 円
	22232	500 ml	3,850 円
OG-6Q	22241	200 ml	2,200 円
	22242	500 ml	4,675 円
EA-50Q	22251	200 ml	2,200 円
	22252	500 ml	4,675 円
ラピッド・フィックス	20011	40 ml	1,200 円
エタノール 95	43112	18 l	10,700 円



武藤化学株式会社

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-10-7 03-3814-5511
 大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-2 5 06-6453-0007